



## Das nicht abrasive, schonende Pflegesystem für alle gängigen gasdurchlässigen, flexiblen Contactlinsen

### Konzeption

Die ideale Abstimmung der Lösungen „Reinigen R“, „Spülen S“ und „Benetzen B“ ergibt eine schonende Pflege und einen optimalen Tragekomfort der Contactlinsen.

### Contopharma „Reinigen R“


Contopharma „Reinigen R“ ist das Resultat einer längeren Entwicklung<sup>1</sup> auf der Suche nach einer nicht abrasiven (zur Schonung der Linsen), tensidhaltigen Formulierung mit hoher Reinigungskraft ohne übermässige Reizungen bei direktem Augenkontakt. Contopharma „Reinigen R“ ist frei von schwermetallhaltigen Desinfektionsstoffen.



Verunreinigungen vor und nach der Reinigung. Links: mit blauem Farbstoff sichtbar gemachte Verunreinigungen. Rechts: Mit üblichem Handelsprodukt gereinigte Linse. Mitte: Mit Lösung „Reinigen R“ behandelte Linse<sup>1</sup>.


### Contopharma „Spülen S“

Contopharma „Spülen S“ ist eine polyfunktionelle Spül- und Aufbewahrungslösung für gasdurchlässige, flexible und stabile Contactlinsen. Sie hält die Linse im hydratisierten, isotonischen Zustand und hemmt das Wachstum kontaminierender Mikroorganismen, ohne Anreicherung des schleimhautverträglichen Konservierungsmittels auf der Oberfläche der Contactlinsen. Eine spezielle Mischung kombinierter Polymere („antisoiling agent“) hydrophilisiert die Contactlinse zur Optimierung des Tragekomforts, erleichtert den Reinigungsprozess („antisoiling effect“) und verhindert weitgehend Anlagerungen von Verunreinigungen, wobei sekundäre Immunreaktionen (Augenrötungen, GPC u. ä.) minimiert werden.

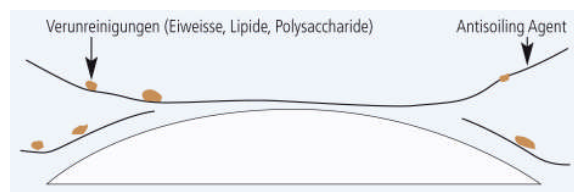

### Contopharma „Benetzen B“

Contopharma „Benetzen B“ enthält eine spezielle Kombination polymerer Feuchthaltemittel und dient der Nachbenetzung in situ von gasdurchlässigen, flexiblen und stabilen Contactlinsen während des Tragens.

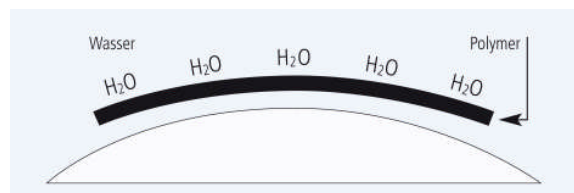

<sup>1</sup>data on file: Contopharma AG, Interlaken